

Лечение с человеческим прикосновением

Человеческое прикосновение обладает удивительной способностью исцелять.

Это так просто, и в то же время так волнующе.

В компании Smith & Nephew мы приняли эту истину близко к сердцу, предлагая более человечный подход к лечению ран.

Система **RENASYS TOUCH** разработана для того, чтобы предложить уверенную простоту, мощность и портативность. Это способствует эффективной терапии, поддерживая индивидуальный подход к пациенту и в больнице и на дому.

 **smith&nephew**
RENASYS[®] TOUCH
Negative Pressure Wound Therapy



Предлагаем вам RENASYS[®] TOUCH

Создан для простоты и индивидуальных решений

Стремление компании Smith & Nephew к новаторским исследованиям привело к разработке RENASYS TOUCH, мощного устройства, созданного для простоты использования.

В RENASYS TOUCH используются новейшие технологии производства компонентов и передовое программного обеспечение для создания удобного пользовательского интерфейса, обеспечивающего точную и стабильную работу. Небольшой компрессор RENASYS TOUCH позволяет пациентам сохранять свой образ жизни во время прохождения терапии для лучшего соблюдения протоколов лечения и улучшения восстановления.



Ключевые преимущества RENASYS TOUCH

Удобный интерфейс

- Интуитивно понятный, легкий в навигации сенсорный экран с настройкой и запуском терапии с главного экрана.

Широкий выбор режимов терапии

- Выбор между непрерывным, переменным и прерывистым режимом работы настроек и индивидуальная настройка цикла работы для точного контроля за проведением NPWT

Встроенные средства обучения и помощи

- Доступ к кратким справочным руководствам, помощь в устранении неполадок и контактная информация службы поддержки клиентов

Регулируемые настройки громкости сигналов тревоги



- Регулируемая громкость сигнала тревоги облегчает индивидуальный уход за пациентом^{1, 2, 3, 4}

Оценка уровня утечки

- Flow Meter помогает оперативно обнаружить и устранить тревожные сигналы, а проверка герметичности во время наложения повязки делает этот процесс более удобным

Ежедневные детальные журналы проведенной терапии

- Всесторонние данные о терапии на устройстве обеспечивают фиксацию данных о терапии

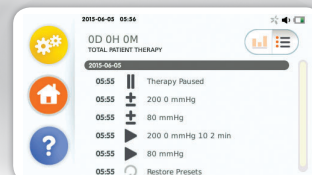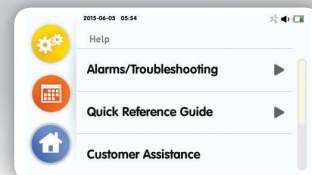

RENASYS TOUCH компрессор	66801280
RENASYS TOUCH 300ml канистра с силикогелем	66801273
RENASYS TOUCH 300ml канистра без силикогеля	66801275
RENASYS TOUCH 800ml канистра с силикогелем	66801274
RENASYS TOUCH ремень	66801276
RENASYS TOUCH сумка	66801277
RENASYS TOUCH руководство для больницы	66801287
RENASYS TOUCH руководство о помощи на дому	66801288
RENASYS TOUCH сервисное руководство	66801289
RENASYS TOUCH уплотнительное кольцо	66801283
RENASYS TOUCH фильтр против запаха	66801284
RENASYS TOUCH крепление к штативу или спинке кровати	66801278

Ссылки:

1. Smith & Nephew Data on file. DS/16/136/R Smith and Nephew's RENASYS Touch Demonstration of Continuous Therapy. April 2016
2. Smith & Nephew Data on file. DS/16/137/R Smith and Nephew's RENASYS Touch Demonstration of Intermittent Therapy. April 2016.
3. Smith & Nephew Data on file. DS/16/138/R Smith and Nephew's RENASYS Touch Device Features – Adjustable Settings. April 2016
4. Smith & Nephew Data on file. DS/16/139/R Smith and Nephew's RENASYS Touch Device User Modes – Clinician and Patient. April 2016

www.smith-nephew.com/wound www.npwt.com

©Trademark of Smith & Nephew ©2016 April Smith & Nephew



Для получения более детальной информации перед применением просьба ознакомиться с инструкцией пользователя (IFU)

Поддерживаем профессионалов вот уже более 150 лет