


FibroSol Ag



ПОВЯЗКА РАНЕВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ ГИДРОГЕЛЕВАЯ С ИОНАМИ СЕРЕБРА

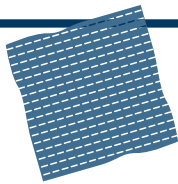

МОДЕЛИРУЕМАЯ
АТРАВМАТИЧНАЯ






БОРЬБА С ИНФЕКЦИЕЙ
БАЛАНС ВЛАЖНОСТИ
ЗАЖИВЛЕНИЕ



СТЕПЕНЬ
ЭКССУДАЦИИ



АНТИМИКРОБНАЯ

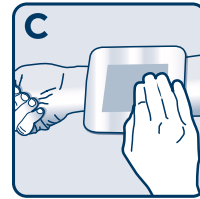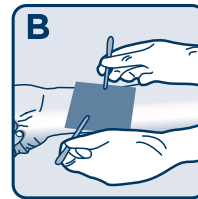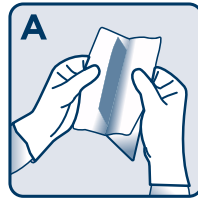

Описание: Антисептическая повязка для местного лечения поверхностных и частично глубоких ран со слабым и умеренным уровнем экссудации. Обеспечивает оптимальные условия заживления раны во влажной среде за счет образования геля при контакте с экссудатом.

NEOFIX® FibroSol Ag - мягкая стерильная повязка, состоящая из двух пропитанных ионным серебром нетканых подушечек из натрий-карбоксиметилцеллюлозных волокон, сшитых вместе. Серебро включено в состав повязки для уничтожения микробов, поглощенных повязкой, и действует как антимикробный барьер для предотвращения проникновения микробов с внешней стороны повязки. Повязка обладает высокой абсорбирующей способностью и образует гель, который поддерживает влажную раневую среду, способствующую заживлению раны и аутолитическому дебридменту.

Показания: **NEOFIX® FibroSol Ag** может использоваться для лечения острых и хронических ран, включая:

- Травмы от давления/пролежни; Венозные язвы; Диабетические/нейропатические язвы нижних конечностей;
 - Хирургические раны, оставленные для заживления вторичным натяжением;
 - Хирургические раны с разошедшимися краями;
 - Места пересадки донорской и реципиентной кожи;
 - Ожоги второй степени;
 - Под наблюдением врача **NEOFIX® FibroSol Ag** может помочь в лечении инфицированных ран и ран, подверженных риску инфицирования, обеспечивая эффективный микробный барьер на срок до 7 дней.
- Лечение должно осуществляться под контролем врача. Только для наружного применения.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов, повышенная чувствительность к серебру. При появлении раздражения или аллергической реакции прекратите использование повязки и обратитесь за консультацией к врачу. Ввиду отсутствия клинических данных не рекомендуется применять во время беременности, кормления грудью и при лечении новорожденных.

NEOFIX® FibroSol Ag не следует использовать людям, у которых есть аллергия на повязку или любой из ее компонентов.

Меры предосторожности: Для одноразового применения. Стерильность гарантирована при целостности упаковки. Не предназначена для использования в качестве хирургической губки или для использования в полостях тела. Влажное заживление ран способствует образованию грануляционной ткани, которая может выделять окрашенную кровью раневую жидкость. Раневые повязки способствуют лечению ран, однако в зависимости от типа раны необходимо обеспечить дополнительную поддержку (компрессия при лечении венозных язв, разгрузка при диабетических язвах и т.д.). При появлении признаков инфекции обратитесь к специалисту.

Техника наложения повязки:

Вымойте руки и наденьте перчатки в соответствии с местным протоколом. Очистите раневое ложе и окружающую кожу. Выберите размер повязки, обеспечивающий наложение на кожу вокруг раны минимум на 3 см.

- Используя асептическую технику, выньте повязку из упаковки.
- Поместите повязку на рану.
- Закрепите на месте с помощью вторичной повязки или бинта.

Частота смены повязки: Повязку можно оставлять на месте до пропитывания или до 7 дней в зависимости от состояния раны.

Важно:

- Обеспечивает высокую впитывающую и удерживающую способность для ран с умеренным и сильным выделением крови.
- Гелеобразующее волокно хорошо прилегает к ране и обеспечивает плотный контакт с раневой поверхностью.
- Обеспечивает влажную раневую среду, которая способствует заживлению ран, уменьшает боль в ране и способствует аутолитическому дебридменту.
- Серебро обеспечивает широкое антимикробное действие внутри повязки и действует как барьер для загрязнения.

Состав: Нетканый материал на основе карбоксиметилцеллюлозы, нитрат серебра.



T.I.M.E. ПОДРОБНО О ФАКТОРАХ ЭФФЕКТИВНОГО ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН
WWW.RANAM.NET



РАЗМЕР CM X CM	В БЛОКЕ ШТ.	Артикул
10 x 10	10	NF FSOLAG 1010

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0° до +40°С



Производитель: Фармапласт С. А. Е. Амрия Фри Зон 23512, Александрия, Египет.
Импортер/Уполномоченная организация: ООО «АТЕКС ГРУПП», Россия, 140055, Область Московская, город Котельники, Микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е. 303. e-mail: info@atex-gr.com. Сайт: www.atex-gr.com

