



Film Border

NEOFIX®

ПОВЯЗКА РАНЕВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ АДГЕЗИВНАЯ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ
И МЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВ,
ЗАКРЫТИЯ РАН,

ДЛЯ УХОДА ЗА НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОЖИ

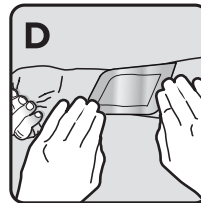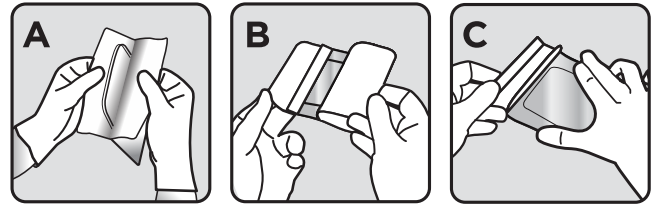

Описание: Прозрачная повязка, состоящая из паропроницаемой водостойкой полимерной пленки, покрытой гипоаллергенным клеевым составом по краям и центром повязки, свободным от адгезива.

Показания: Для фиксации перевязочных средств и медицинских устройств, для закрытия сухих ран или ран с незначительной степенью экссудации, для ухода за незначительными повреждениями кожи.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. При появлении раздражения или аллергической реакции прекратите использование повязки и обратитесь за консультацией к врачу.

Меры предосторожности при использовании:

Стерильность гарантирована при целостности упаковки. Для однократового применения. Повторно не стерилизовать. При вскрытой или поврежденной упаковке не использовать. Немедленно обращайтесь к врачу в случае любых серьезных ран или ожогов, а также при возникновении покраснения или дискомфорта. Как и другие клеящиеся изделия, NEOFIX Film Border следует наклеивать и снимать осторожно. Частая смена повязки, в особенности у пациентов со слабой кожей или дерматологическими заболеваниями, может привести к покраснению или повреждению кожи.

Частота смены повязки: На усмотрение лечащего врача. Может оставаться на ране до 7 дней.

Инструкция по применению:

- Воймите руки до и после обработки раны. Осторожно очистите и высушите рану и окружающую кожу.
- Извлеките повязку из стерильной упаковки.
 - Удалите защитную бумагу, маркированную цифрой 1, закрывающую адгезивную поверхность.
 - Наложите повязку на область раны, не растягивая при этом пленку, и удалите защитную бумагу, маркированную цифрой 2 и полностью приклейте повязку, разглаживая ее от центра к периферии.
 - Полностью приклейте повязку, разглаживая ее от центра к периферии.

Удаление: Снимайте повязку аккуратно по направлению роста волос, придерживая кожу свободной рукой, особенно у пожилых пациентов или у пациентов с истонченной кожей.

Состав: Полиуретан, клейкая основа по краям – синтетический акрилатный клей.

РАЗМЕР CM X CM	В БЛОКЕ ШТ.	Артикул
10 x 10	100	NF FB 1010
10 x 15	60	NF FB 1510

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0° до +40°C



Производитель: Фармапласт С. А. Е. Амрия Фри Зон 23512, Александрия, Египет.
Импортер/Уполномоченная организация: ООО «АТЕКС ГРУПП», Россия, 140055, Область Московская, город Котельники, Микрорайон Белая Дача, Промзона ООО «Технопром», Е. 303, e-mail: info@atex-gr.com. Сайт: www.atex-gr.com

