



Film Frame

NEOFIX®

ПОВЯЗКА РАНЕВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ АДГЕЗИВНАЯ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВ, ЗАКРЫТИЯ РАН, ДЛЯ УХОДА ЗА НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОЖИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕРАПИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

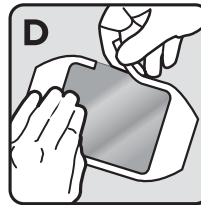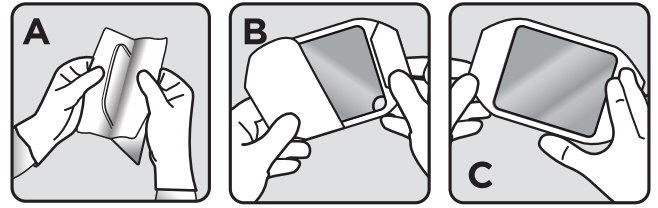

Описание: Прозрачная повязка, состоящая из паропроницаемой водостойкой полимерной пленки, полностью покрытой гипоаллергенным клеевым составом. Для удобства наложения и позиционирования повязки снабжена удаляемой бумажной рамкой.

Показания: Для фиксации перевязочных средств и медицинских устройств, закрытия ран, ухода за незначительными повреждениями кожи. Использование в качестве изолирующей пленки при проведении NPWT терапии.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. При появлении раздражения или аллергической реакции прекратите использование повязки и обратитесь за консультацией к врачу.

Меры предосторожности при использовании:

Стерильность гарантирована при целостности упаковок. Для одноразового применения. Повторно не стерилизовать. При вскрытой или поврежденной упаковке не использовать. Немедленно обращайтесь к врачу в случае любых серьезных ран или ожогов, а также при возникновении покраснения или дискомфорта. Для обеспечения хорошей адгезии кожа должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Как и другие клеящиеся изделия, NEOFIX FILM FRAME следует накладывать и снимать осторожно. Частая смена повязки, в особенности у пациентов со слабой кожей или дерматологическими заболеваниями, может привести к покраснению или повреждению кожи.

Частота смены повязки: На усмотрение лечащего врача. Может оставаться на ране до 7 дней.

Инструкция по применению:

- Вмойте руки до и после обработки раны.
- Осторожно очистите и высушите рану и окружающую кожу.
- A.** Извлеките повязку из стерильной упаковки.
- B.** Удалите защитную бумагу, маркированную цифрой 1, закрывающую адгезивную поверхность.
- C.** Наложите повязку на область раны, не растягивая при этом пленку.
- D.** Удалите защитную бумагу, маркированную цифрой 2 и полностью приклейте повязку, разглаживая ее от центра к периферии.
- E.** Удалите бумажную рамку, маркированную цифрой 3 с наружной поверхности повязки, начиная от разреза в центре рамки.

Удаление: Снимайте повязку аккуратно по направлению роста волос, придерживая кожу свободной рукой, особенно у пожилых пациентов или у пациентов с истонченной кожей.

Состав: Полиуретан, синтетический акрилатный клей.

РАЗМЕР CM X CM	В БЛОКЕ ШТ.	Артикул
12 x 10	50	NF FF 1210
25 x 10	75	NF FF 2510
30 x 20	25	NF FF 3020

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0° до +40°C



Производитель: Фармапласт С. А. Е. Амрия Фри Зон 23512, Александрия, Египет. Импортер/Уполномоченная организация: ООО «АТЕКС ГРУПП», Россия, 140055, Область Московская, город Котельники, Микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е. 303, e-mail: info@atex-gr.com. Сайт: www.atex-gr.com

