

IV PU


NEOFIX®

ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДИСТЫХ КАТЕТЕРОВ, ИГЛ, КАНЮЛЬ, ДРЕНАЖЕЙ И ДР.

- Влагостойкий
- Паропроницаемый
- Адгезивный

Регистрационное удостоверение РУ ФСЗ 2011/09942 от 04.09.2020

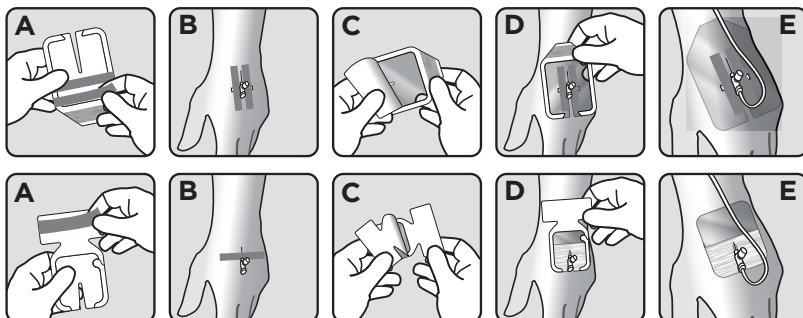

Описание: Стерильный прозрачный влагонепроницаемый пластырь - повязка на полимерной (пленочной) основе с U-образным вырезом в центре; с системой наложения с помощью рамки и двумя фиксирующими полосками.

Показания: Для фиксации периферических сосудистых катетеров, игл, канюль, трубок, зондов и прочих медицинских изделий, в том числе при их установке на продолжительное время, включая использование с целью фиксации центральных катетеров.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. При появлении раздражения или аллергической реакции прекратите использование повязки и обратитесь за консультацией к врачу.

Меры предосторожности: Стерильность гарантирована при целостности упаковки. Для одноразового применения. Повторное использование повышает риск заражения или перекрестного загрязнения. Повязку не следует использовать при выделении из раны больших количеств экссудата, так как это может привести к мацерации окружающих тканей. Повязку не следует использовать для пациентов с известной чувствительностью к акриловому клею. Повязку можно накладывать на инфицированные раны только под наблюдением врача. Кожа перед наложением должна быть чистой и сухой, чтобы обеспечить хорошую адгезию.

Частота смены повязки: Определяется лечащим врачом, но не реже 1 раза в 7 дней.

Рекомендации по наложению повязки **NEOFIX IV PU 5 x 5,7 см:**

Вскройте пакет, используя асептическую технику, и достаньте пластырь.

A-B. В случае фиксации канюли снимите фиксирующие полоски и закрепите ими крылья канюли с обеих сторон.

C. Удалите защитное бумажное покрытие со стороны рамки и с обратной стороны, чтобы обнажить клейкую поверхность.

D. Аккуратно расположите прозрачную часть повязки по центру, удерживая ее за свободную бумажную часть рамки.

E. Удалите свободный бумажный фрагмент рамки после наложения повязки. Затем медленно удалите бумажную рамку, усиливающую края повязки.

Рекомендации по наложению повязки **NEOFIX IV PU 7 x 9 см:**

Вскройте пакет, используя асептическую технику, и достаньте пластырь.

A-B. В случае фиксации канюли снимите фиксирующие полоски и закрепите ими крылья канюли с обеих сторон.

C. Удалите защитное бумажное покрытие со стороны рамки и с обратной стороны, чтобы обнажить клейкую поверхность.

D. Аккуратно расположите прозрачную часть повязки по центру, затем медленно удалите бумажную рамку, усиливающую края повязки.

E. Задокументируйте данные пациента на этикетке, окрашенной под цвет кожи, наклеив ее рядом с повязкой.

Состав: основа - полимерная полиуретановая плёнка, клейкая основа - синтетический акрилатный клей, с вставкой и фиксирующей лентой из нетканого материала — полипропилена.



РАЗМЕР см x см	В БЛОКЕ шт.	Артикул
5 x 5,7	100	NF IVPU 57
7 x 9	100	NF IVPU 79

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0° до +40°C



Производитель: Фармапласт С. А. Е, Амрия Фри Зон 23512, Александрия, Египет.
Импортер/Уполномоченная организация: ООО «АТЕКС ГРУПП», Россия, 140055, Область Московская, город Котельники, Микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е. 303. e-mail: info@atex-gr.com. Сайт: www.atex-gr.com