


## ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

ДЛЯ АТРАВМАТИЧНОГО  
СОПОСТАВЛЕНИЯ КРАЕВ РАНЫ  
И СТАБИЛИЗАЦИИ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РУБЦОВ

- Паропроницаемый
- Адгезивный

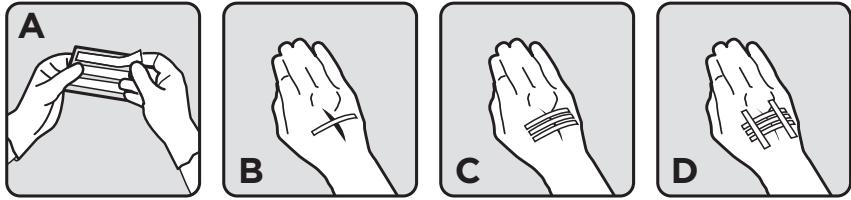

**Описание:** Гибкие адгезивные стерильные полоски белого цвета для бесшовного сведения краев ран.

**Показания:** Для лечения порезов и хирургических разрезов; могут быть использованы совместно при наложении швов в сочетании с металлическими скобками и подкожными швами или после их удаления для заживления раны с оптимальным косметическим результатом; для фиксации кожных трансплантатов.

**Противопоказания:** Индивидуальная непереносимость материалов. При появлении раздражения или аллергической реакции прекратите использование повязки и обратитесь за консультацией к врачу.

### Меры предосторожности:

Немедленно обращайтесь к врачу в случае любых серьезных ран или ожогов, а также при возникновении покраснения или дискомфорта. Для обеспечения хорошей адгезии кожа должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Как и другие kleящиеся изделия, NEOFIX STRIP следует накладывать и снимать осторожно. Частая смена повязки, в особенности у пациентов со слабой кожей или дерматологическими заболеваниями, может привести к покраснению или повреждению кожи.

**Частота смены повязки:** До 14 дней или до заживления раны.

### Рекомендации по наложению повязки NEOFIX Strip:

Вымойте руки до и после обработки раны.

Очистите и высушите кожу вокруг раны.

Извлеките подложку с полосками из стерильной упаковки.

**A.** Оторвите край бумажной подложки.

**B.** Начиная со средины раны приклейте половину одной полоски к коже с одной стороны раны, сопоставьте кожные края раны и зафиксируйте вторую часть полоски с противоположной стороны раны.

**C.** Остальные полоски размещайте попеременно выше и ниже первоначально наклеенной полоски на расстоянии 1 см друг от друга. Это позволит сохранить оптимальное натяжение кожных краев раны. Продолжайте накладывать полоски, пока рана не будет закрыта на всем протяжении.

**D.** Для обеспечения дополнительной фиксации полосок разместите дополнительные полоски перпендикулярно ранее наложенным с каждой стороны раны.

**Удаление:** Снимайте полоски аккуратно, придерживая кожу свободной рукой, особенно у пожилых пациентов или у пациентов с истонченной кожей.

**Состав:** Полиамидный нетканый материал, поливиниловый акриловый клей, силиконовая бумажная подложка.



РАЗМЕР 4 x 38 мм — 8 полосок пластыря  
РАЗМЕР 6,4 x 76 мм — 6 полосок пластыря  
РАЗМЕР 13 x 102 мм — 6 полосок пластыря

РАЗМЕР В БЛОКЕ АРТИКУЛ  
ММ X ММ инд.упаковок

4 x 38	200	NF S 438
6,4 x 76	200	NF S 676
13 x 102	100	NF S 13102

**Условия хранения:** в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0° до +40°C



STERILE EO



Производитель: Фармапласт С. А. Е., Амрия Фри Зон 23512, Александрия, Египет.  
Импортер/Уполномоченная организация: ООО «АТЕКС ГРУПП», Россия, 140055, Область  
Московская, город Котельники, Микрорайон Белая Дача, Промзона ООО «Технопром»,  
E, 303, e-mail: info@atex-gr.com, Сайт: [www.atex-gr.com](http://www.atex-gr.com)

