


Strip

ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ



ДЛЯ АТРАВМАТИЧНОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ КРАЕВ РАНЫ И СТАБИЛИЗАЦИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РУБЦОВ

- Паропроницаемый
- Адгезивный

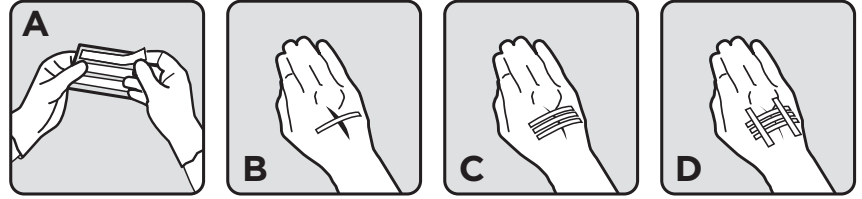

Описание: Гибкие адгезивные стерильные полоски белого цвета для бесшовного сведения краев ран.

Показания: Для лечения порезов и хирургических разрезов; могут быть использованы совместно при наложении швов в сочетании с металлическими скобками и подкожными швами или после их удаления для заживления раны с оптимальным косметическим результатом; для фиксации кожных трансплантатов.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. При появлении раздражения или аллергической реакции прекратите использование повязки и обратитесь за консультацией к врачу.

Меры предосторожности:

Немедленно обращайтесь к врачу в случае любых серьезных ран или ожогов, а также при возникновении покраснения или дискомфорта. Для обеспечения хорошей адгезии кожа должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Как и другие клеящиеся изделия, NEOFIX STRIP следует накладывать и снимать осторожно. Частая смена повязки, в особенности у пациентов со слабой кожей или дерматологическими заболеваниями, может привести к покраснению или повреждению кожи.

Частота смены повязки: До 14 дней или до заживления раны.

Рекомендации по наложению повязки NEOFIX Strip:

Вымойте руки до и после обработки раны.

Очистите и высушите кожу вокруг раны.

Извлеките подложку с полосками из стерильной упаковки.

A. Оторвите край бумажной подложки.

B. Начиная со стороны раны приклейте половину одной полоски к коже с одной стороны раны, сопоставьте края раны и зафиксируйте вторую часть полоски с противоположной стороны раны.

C. Остальные полоски размещайте попеременно выше и ниже первоначально наклеенной полоски на расстоянии 1 см друг от друга. Это позволит сохранить оптимальное натяжение кожных краев раны. Продолжайте накладывать полоски, пока рана не будет закрыта на всем протяжении.

D. Для обеспечения дополнительной фиксации полосок разместите дополнительные полоски перпендикулярно ранее наложенным с каждой стороны раны.

Удаление: Снимайте полоски аккуратно, придерживая кожу свободной рукой, особенно у пожилых пациентов или у пациентов с истонченной кожей.

Удаление: Снимайте полоски аккуратно, придерживая кожу свободной рукой, особенно у пожилых пациентов или у пациентов с истонченной кожей.

Состав: Полиамидный нетканый материал, поливиниловый акриловый клей, силиконовая бумажная подложка.



РАЗМЕР 4 x 38 мм — 8 полосок пластыря

РАЗМЕР 6,4 x 76 мм — 6 полосок пластыря

РАЗМЕР 13 x 102 мм — 6 полосок пластыря

РАЗМЕР мм x мм	В БЛОКЕ инд.упаковок	Артикул
4 x 38	200	NF S 438
6,4 x 76	100	NF S 676
13 x 102	100	NF S 13102

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0° до +40°C



Производитель: Фармапласт С. А. Е. Амрия Фри Зон 23512, Александрия, Египет.
Импортер/Уполномоченная организация: ООО «АТЕКС ГРУПП», Россия, 140055, Область Московская, город Котельники, Микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е. 303, e-mail: info@atex-gr.com. Сайт: www.atex-gr.com

