



**Smith+Nephew**

Средства перевязочные  
Повязка абсорбирующая

**ALLEVYN<sup>®</sup>**  
**ADHESIVE**

адгезивная губчатая  
полиуретановая

**СТЕРИЛЬНО** Радиационный метод стерилизации.

Предназначено только для одноразового использования. Не использовать повязку из открытой или поврежденной упаковки. Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°C/77°F. Избегать воздействия света.

### Описание

Повязка ALLEVYN Adhesive имеет современную трехслойную конструкцию, состоящую из абсорбирующего губчатого слоя, расположенным между не прилипающим перфорированным внутренним слоем, непосредственно контактирующим с раной, и наружным пленочным полупроницаемым покрытием, защищающим рану от проникновения микроорганизмов и влаги.

### Механизм действия

Современная трехслойная конструкция ALLEVYN Adhesive помогает поддерживать оптимальную влажность в области раны, что способствует созданию оптимальной раневой среды для наилучшего заживления ран и уменьшению риска мацерации. Наружное пленочное покрытие помогает защитить раны от проникновения микроорганизмов и влаги.

Для фиксации повязки не требуется вторичная повязка, ее легко накладывать и удалять.

### Показания к применению

Заживление ран вторичным натяжением, лечение хронических гранулирующих ран, хронических и острых экссудировующих ран, как глубоких, так и поверхностных, таких как пролежни, трофические венозные язвы, диабетические язвы стоп, малигнизированные язвы, хирургические раны, ожоги первой и второй степени, донорские участки при пересадке кожи и грибковые язвы. В некротических и гнойно-фибринозных ранах может использоваться совместно с гелем INTRASITE®.

ALLEVYN Adhesive может также использоваться для инфицированных ран. При использовании в инфицированных ранах необходимо определение возбудителя инфекции и лечение согласно принятому клиническому протоколу.

### Меры предосторожности

- Не применяйте повязки ALLEVYN Adhesive вместе с такими окислителями, как растворы гипохлорита (например, ЭУСОЛ) или перекиси водорода, поскольку они могут повредить абсорбирующий полиуретановый компонент повязки. Как и у всех самоклеящихся повязок, при использовании ALLEVYN Adhesive описаны отдельные случаи раздражения и мацерации кожи вокруг раны, а также редкие случаи гиперчувствительности. Если началось покраснение кожи или возникла аллергическая реакция, удалите повязку и обратитесь за консультацией к специалисту.
- Необходимо отметить, что раздражение кожи чаще встречается при неправильном использовании повязки или слишком частой ее смене, особенно у пациентов с чувствительной кожей.
- ALLEVYN Adhesive – это продукт для однократного использования. Применение одной повязки

для лечения ран у нескольких пациентов может вызвать перекрёстное заражение или развитие инфекции. Вскрытие упаковки нарушает стерильность повязки, поэтому нельзя откладывать наложение вскрытой повязки на другой день.

### Инструкция по применению:

1. Очистите рану в соответствии с местным клиническим протоколом.
2. Выберите повязку подходящего размера. При необходимости вырежьте повязку подходящей формы ALLEVYN Adhesive. Моделируя повязку, всегда соблюдайте асептические условия.
3. Подготовьте и очистите кожу вокруг раны путем удаления избыточного экссудата. Сбрейте волосы вокруг раны, чтобы повязка хорошо прилегла к раневой поверхности. Для обработки чувствительных участков кожи перед аппликацией ALLEVYN Adhesive используйте салфетки SKIN-PREP®.
4. Соблюдая стерильность, начните удалять защитную наклейку с ALLEVYN Adhesive и накладывать повязку клейкой стороной на кожу.
5. Удалите оставшуюся защитную наклейку, полностью наложите повязку, осторожно разгладьте её над раной, стараясь не допускать образования складок. Губчатый слой должен закрывать всю поверхность раны.
6. Если ALLEVYN Adhesive был вырезан, необходимо защитить открытые губчатые участки подходящим пленчатым покрытием, стараясь не закрыть всю повязку.
7. При наложении повязки ALLEVYN Adhesive Sacrum расположите узкий конец повязки на 2 см выше анального сфинктера, а затем разгладьте повязку над крестцом.

### Частота смены повязки

В начальных фазах лечения раны ревизия повязки ALLEVYN Adhesive должна производиться согласно местному клиническому протоколу. Повязку можно оставлять на месте до 7 дней, в зависимости от состояния раны и окружающей кожи или до тех пор, пока видимая граница экссудата не достигнет 0,5 см от края повязки. Если повязку накладывают на крестцовую зону, то этот срок не должен превышать 5 дней, однако, учитывая повышенную вероятность загрязнения и заражения, ревизию повязки следует проводить чаще согласно местному клиническому протоколу. Решение о смене повязки должно зависеть от клинической оценки с учетом требований местных протоколов.

### Удаление повязки

Чтобы удалить повязку ALLEVYN Adhesive необходимо вначале приподнять ее за один из уголков и затем потянуть наружу до полного удаления ее из раны. Удаление повязки на крестце рекомендуется начинать с верхнего края по направлению к анусу для минимизации риска распространения инфекции. Шкала на упаковке повязки предназначена исключительно для выбора повязки, следует следить за тем, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

<b>Ассортимент</b>		
<b>Код</b>	<b>Размер</b>	<b>Штук в упаковке</b>
66000043	7.5 см x 7.5 см / 3" x 3"	10
66000599	10 см x 10 см / 4" x 4"	10
66000044	12.5 см x 12.5 см / 5" x 5"	10
66000777	15 см x 15 см / 6" x 6"	3
66000045	17.5 см x 17.5 см / 7" x 7"	10
66000744	12.5 см x 22.5 см / 5" x 9"	10
66000046	22.5 см x 22.5 см / 9" x 9"	10
66000451	Повязка Sacrum 22 см x 22 см / 9" x 9"	10
66000700	Повязка Sacrum 17 см x 17 см / 6 3/4" x 6 3/4" "- дюймы	10

**Производитель**

Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN,  
Англия

Товарные знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew

Дата выдачи 12/2013

Номера патентов: US 5681575, 5753251, 5770255,  
5837275 www.smith-nephew.com



**УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РОССИИ:**

ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва,  
2-й Сыромятничный пер., д.1, 9 этаж, пом. 1, ком.1  
Тел: +7 (495) 755-55-03