



Smith+Nephew

Средства перевязочные
Повязка абсорбирующая

ALLEVYN[®]

NON-ADHESIVE

Неадгезивная гидропористая



Радиационный метод стерилизации.

Предназначено только для одноразового использования. Неиспользовать повязку из открытой или поврежденной упаковки. Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°C/77°F. Избегать воздействия света.

Описание

Повязка ALLEVYN Non-Adhesive представляет собой трехслойную повязку, состоящую из абсорбирующего губчатого слоя, расположенного между неприлипающим перфорированным внутренним слоем, непосредственно контактирующим с раной, и наружным пленочным полупроницаемым покрытием, защищающим рану от проникновения микроорганизмов и влаги.

Механизм действия

Современная трехслойная конструкция ALLEVYN Non-Adhesive помогает поддерживать оптимальную влажность в области раны, что способствует созданию оптимальной раневой среды для наилучшего заживления ран и уменьшению риска мацерации. Наружное пленочное покрытие помогает защитить раны от проникновения микроорганизмов и влаги. Повязку легко накладывать и удалять. Отсутствие адгезивного компонента позволяет применять повязку на чувствительной коже.

Показания к применению

Заживление ран вторичным натяжением, лечение хронических и острых глубоких ран, неполнослойных или поверхностных гранулирующих экссудующих ран, таких как пролежни, трофические венозные язвы, диабетические язвы стоп, малигнизированные язвы, хирургические раны, ожоги первой и второй степени, донорские участки при пересадке кожи и грибковые язвы. ALLEVYN Non-Adhesive может также использоваться для инфицированных ран. При использовании в инфицированных ранах необходимо определение возбудителя инфекции и лечение согласно клиническим правилам. Допускается применение повязки ALLEVYN Non-Adhesive с компрессией. В некротических и гнойно-фибринозных ранах повязка ALLEVYN Non-Adhesive может использоваться совместно с гелем INTRASITE®. Повязка ALLEVYN Heel используется для пяток и других частей тела сложного рельефа совместно с антипрессорными устройствами в рамках протокола лечения пролежней.

Меры предосторожности

- Не применяйте повязки ALLEVYN NonAdhesive вместе с такими окислителями, как растворы гипохлорита (например, EUSOL (ЭУСОЛ)) или перекиси водорода, поскольку они могут повредить абсорбирующий полиуретановый компонент повязки.
- Если началось покраснение кожи или возникла аллергическая реакция, удалите повязку и обратитесь за консультацией к специалисту. Запрещается использовать ALLEVYN Heel для лечения пролежней без антипрессорных устройств.
- ALLEVYN Non-Adhesive – это продукт для однократного использования. Применение одной повязки для лечения ран у нескольких пациентов может вызвать перекрёстное заражение или развитие инфекции. Вскрытие упаковки нарушает стерильность повязки, поэтому нельзя откладывать наложение вскрытой повязки на другой день.

Инструкция по применению

- 1 Очистите рану в соответствии с клиническими правилами.
- 2 Выберите повязку подходящего размера. Повязка ALLEVYN Non-Adhesive может использоваться на поверхности частей тела сложного рельефа. Моделируя повязку, всегда соблюдайте асептические условия. При компрессионной терапии повязку необходимо обрезать под размер раны.
- 3 Подготовьте и очистите кожу вокруг раны путем удаления избыточного экссудата. Удалите волосы вокруг раны, чтобы повязка хорошо прилегалась к раневой поверхности.
- 4 Соблюдая стерильность, достаньте повязку ALLEVYN Non-Adhesive из упаковки.
- 5 Наложите ALLEVYN Non-Adhesive белой поверхностью на рану и укрепите фиксирующей пленкой (например, OPSITE® Flexifix или OPSITE® Flexifix Gentle), пластырем или бинтом.
- 6 Если повязка ALLEVYN Non-Adhesive была вырезана, необходимо защитить открытые губчатые участки подходящим пленчатым покрытием, стараясь не закрыть всю повязку.

Частота смены повязки

В начальных фазах лечения раны ревизия повязки ALLEVYN Non-Adhesive должна производиться часто. Повязку можно оставлять на месте до 7 дней или до тех пор, пока видимая граница экссудата не достигнет 1,5 см от края повязки. Если повязку накладывают на крестцовую зону, то этот срок не должен превышать 5 дней, однако, учитывая повышенную вероятность загрязнения и заражения, ревизию повязки следует проводить чаще. Решение о смене повязки должно зависеть от клинической оценки состояния раны.

Удаление повязки

Для удаления повязки снимите фиксирующую повязку или бинт и аккуратно извлеките повязку из раны. Шкала на упаковке повязки предназначена исключительно для выбора повязки, следует следить за тем, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Ассортимент

Код	Размер	Штук в упаковке
6007643	5 см x 5 см / 2" x 2"	10
66007637	10 см x 10 см / 4" x 4"	10
66007335	10 см x 20 см / 4" x 8"	10
66000093	15 см x 15 см / 6" x 6"	10
66007638	20 см x 20 см / 8" x 8"	10
66000663	40 см x 70 см / 153" x 271"	2
66007630	Пятка	5
66000773	Пятка	10
	"- дюймы	

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessel Road, Hull HU3 2BN, Англия
 ◊ Торговые марки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 12/2013



УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РОССИИ:

ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнинский пер., д.1, 9 этаж, пом. 1, ком.1
 Тел: +7 (495) 755-55-03