



Smith+Nephew

Средства перевязочные
Повязка абсорбирующая

BACTIGRAS[◇]

Марлевая

с хлоргексидина ацетатом

СТЕРИЛЬНО

Предназначено только для однократного использования.

Радиационный метод стерилизации. Не использовать повязку из открытой или поврежденной упаковки. Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°C. Избегать воздействия света.

Описание

BACTIGRAS° – это повязки из крупноячеистой марли, пропитанной мягким парафином, содержащим 0,5% хлоргексидина ацетата. Их выпускают в стерильном виде как индивидуальные повязки в легко вскрываемых пакетах или в рулонах открывающихся при помощи вскрывающей нити.

Механизм действия

Повязка BACTIGRAS действует в качестве барьера между раной и вторичной повязкой, позволяя экссуdates проходить через него в абсорбирующую вторичную повязку.

Антисептик хлоргексидина ацетат медленно высвобождается из повязки, оказывая длительное действие против грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Показания к применению

BACTIGRAS предназначен только для наружного применения. BACTIGRAS рекомендуется для лечения разнообразных инфицированных или потенциально инфицированных ран комплексно вместе с системной антибактериальной терапией.

Раны, при которых можно использовать BACTIGRAS:

- Поверхностные ожоги, в том числе жидкостью или паром
- Ссадины, потертости и другие повреждения поверхности кожи
- Донорские и реципиентские участки при трансплантации кожи
- Венозные трофические язвы

Противопоказания

- Не использовать на участках кожи, составляющих более 10% поверхности тела.

Ассортимент

Код	Размер	Штук в упаковке
7456	5 см x 5 см	50 повязок
7457	10 см x 10 см	10 повязок
66003650	10 см x 10 см	50 повязок
66003661	10 см x 40 см	10 повязок
7461	15 см x 20 см	10 повязок
66007505	15 см x 1 м "- дюймы	12 рулонов

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hesse Road, Hull HU3 2BN, Англия

° Торговые марки Smith & Nephew ©Smith & Nephew

Дата выдачи 12/2013 www.smith-nephew.com



0086

УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РОССИИ:

ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д.1, 9 этаж, пом. 1, ком.1 Тел: +7 (495) 755-55-03

46659_RU_Jul17

- Не использовать при известной гиперчувствительности или аллергии на хлоргексидин.

Меры предосторожности

Описаны отдельные случаи дерматитов, контактной чувствительности и фотосенсибилизации, а также анафилактические реакции на хлоргексидин. Избегайте контакта повязки с глазами, средним ухом, мозговыми оболочками и веществом мозга. Повязка BACTIGRAS несовместима с мылами, другими анионными материалами, иодистым калием. Недопустимо использование BACTIGRAS совместно со средствами обработки ран, содержащими окислители. BACTIGRAS предназначена для однократного использования. Применение повязки для лечения ран другого пациента может вызвать перекрёстное заражение или развитие инфекции. Вскрытие упаковки нарушает стерильность повязки, поэтому нельзя откладывать наложение вскрытой повязки на другой день.

Инструкция по применению:

1. Произведите стандартную очистку раны.
2. Выберите повязку подходящего размера и вскройте упаковку (или оторвите упаковку с повязкой от края рулона).
3. В перчатках, используя пинцет, отделите защитную пленку от поверхности повязки.
4. Наложите повязку непосредственно на поверхность раны в один слой.
5. При необходимости наложите сверху вторичную абсорбирующую повязку и укрепите ее фиксирующим бинтом или наклейкой.
6. Удаление.
При смене вторичной абсорбирующей повязки BACTIGRAS можно оставить на месте. Частота смены повязки зависит от состояния раны и может колебаться от одного раза в сутки до двух раз в неделю.
7. Если повязка прилипла к поверхности раны, аккуратно смочите ее стерильным физиологическим раствором.