



# Carbonet<sup>◇</sup>

Поглощающая запах  
абсорбирующая  
повязка

**СТЕРИЛЬНО**



Для одноразового использования. Стерилизовано гаммаизлучением.

Не используйте, если упаковка открыта или повреждена. Хранить в сухом месте (<25 °C).

#### Описание

CARBONET – это многослойная поглощающая за-пах повязка, состоящая из контактирующего с раной слоя с низкой адгезивной способностью, слоя адсорбента, слоя активированного угля и защитного слоя.

#### Показания

CARBONET назначается при экссудирующих, инфицированных и зловонных ранах, таких как:

- трофические язвы нижних конечностей;
- фунгозные карциномы;
- каловые свищи;
- инфицированные хирургические раны.

#### Противопоказания и меры предосторожности

Нет.

#### Применение

1. При необходимости, очистить рану подходящим средством.
2. Промыть рану стерильным физиологическим раствором или растворами антисептиков.
3. Наложить повязку блестящей стороной непосредственно на рану.
4. Закрепить удерживающей повязкой (например, ОПСАЙТ♦Флексификс), пластырем или другой фиксирующей повязкой.

#### Частота смены

Повязки CARBONET могут оставаться на месте 2-3 дня в зависимости от объема экссудата.

#### Снятие повязки

Для снятия повязки CARBONET удалите фиксирующий бинт или пластырь, а затем удалите повязку с раны.

#### Доступность продукта

Код	Размер	Доступность
7064	10 см x 10 см	10
7065	10 см x 20 см	10
66007066	10 см x 10 см	12
66007067	10 см x 20 см	12

#### Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, England

° Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew

Дата выпуска 12/2014

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

