




Smith+Nephew

Средства перевязочные
Повязка моделируемая гелевая

CICA-CARE[◇]

 Не используйте, если упаковка открыта или повреждена.

Описание

Повязка в виде пластинки из силиконового геля CICA-CARE® – это мягкая самоклеящаяся полупроницаемая повязка из высококачественного силиконового геля, усиленная силиконовой мембраной.

Показания

CICA-CARE предназначен для временного использования:

1. при лечении имеющихся и новых гипертрофических и келоидных рубцов;
2. в качестве профилактического лечения на ушитых хирургических ранах, чтобы помочь предотвратить появление гипертрофированных и келоидных рубцов.

Противопоказания

Не используйте для пациентов с осложняющими медицинскими факторами, которые могут не позволить им правильно использовать гелевый лист. Не используйте для пациентов с дерматологическими заболеваниями (напр., псориаз и акне). НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА ОТКРЫТЫХ РАНАХ или в местах, где целостность кожи нарушена.

Меры предосторожности

В некоторых случаях под повязкой появляется кожная сыпь. Это клиническое проявление является прямым следствием недостаточной гигиены или слишком тугой фиксации повязки. При появлении кожной сыпи время ношения повязки должно быть сокращено до 12 часов в сутки вплоть до регрессии высыпаний. При сохранении сыпи не используйте повязку и проконсультируйтесь с врачом. При профилактике рубцов на месте свежих послеоперационных ран повязка CICA-CARE может накладываться лишь после снятия швов.

Внимательно соблюдайте инструкции по адаптации кожных покровов и очистке повязки.

Осложнения и побочные эффекты

Риски и осложнения при использовании CICA-CARE:

1. Поверхностная мацерация кожи.
2. Сыпь.
3. Зуд.

Инструкция по применению

1. Очистите и высушите область рубца и окружающую кожу.
2. Откройте упаковку и извлеките лист CICA-CARE с находящейся в ней подкладкой.
3. Отрежьте часть, размером превышающим рубец с небольшим перекрытием окружающей кожи (A). Для больших рубцов используйте несколько пластинок рядом друг с другом. Чтобы облегчить снятие, убедитесь, что на отрезанной части есть язычок для снятия на подложке.
4. Аккуратно снимите подложку и, не растягивая, наложите клейкой стороной на рубец (B, C).
5. CICA-CARE является самоклеящимся, но также может фиксироваться с помощью соответствующего слегка эластичного бинта или пластыря, например,

Opsite® Flexifix или PRIMAFIX® Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать слишком тесного контакта с рубцом, поскольку это может привести к раздражению рубца и окружающей области.

6. Храните неиспользованную часть в оригинальной упаковке в сухом месте (<25 °C).

Рекомендуемый уход

1. Мойте CICA-CARE два раза в день в щадящем немыльном мыльном растворе и прополаскивайте чистой теплой водой (D). Промокните и снова наложите на сухой отчищенный рубец. Не используйте моющие средства, поскольку это может привести к раздражению кожи. Не используйте бумажные изделия (напр., кухонные полотенца) для высушивания CICA-CARE, поскольку они могут приклеиться к гелевому листу.

ПРИМЕЧАНИЕ. В теплую погоду или во время физической активности, когда может возникнуть потоотделение, необходимо чаще мыть CICA-CARE для обеспечения комфорта и сохранения оптимального контакта между CICA-CARE и кожей.

2. Перед применением убедитесь, что рубец и окружающая кожа чистые и сухие
3. В течение терапии CICA-CARE следует использовать как минимум 12 часов в сутки. По возможности CICA-CARE следует применять в течение 24 часов с перерывом для мытья.
4. Для лучшей акклиматизации кожи начните с применения CICA-CARE в течение 4 часов в день в первые два дня, 8 часов в течение следующих двух дней, а затем увеличивайте использование на два часа в день, пока не достигните оптимальных 24 часов терапии.
5. Если CICA-CARE начнет терять свои свойства или очистка станет затруднительной, замените повязку. Обычно это происходит через 14-28 дней. Если рубец расположен на суставе или месте, подверженном постоянному трению, этот срок может уменьшиться. Общее время терапии должно быть в пределах от 2 до 4 месяцев.

Доступность продукта

Код	Размер	Доступность
66250707	12 см x 15 см	10 шт. в коробке
66250706	12 см x 15 см	1 шт. в коробке
66250705	12 см x 6 см	40 шт. в коробке
66250704	12 см x 6 см	1 шт. в коробке

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessel Road, Hull HU3 2BN, England

® Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 01/2015 www.smith-nephew.com



УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РОССИИ:

ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнинский пер., д.1, 9 этаж, пом. 1, ком.1
Тел: +7 (495) 755-55-03