



**Smith+Nephew**

Средства перевязочные  
Повязка абсорбирующая

**MELOLIN<sup>®</sup>**

**СТЕРИЛЬНО!**

Для одноразового использования. Стерилизовано паром. Не используйте содержимое, если упаковка открыта или повреждена.

Хранить в сухом месте (<25°C).

#### Описание

Повязка MELOLIN – это повязка с низкой адгезией к ране и высокой абсорбирующей способностью, предназначенная для абсорбции излишнего экссудата из раны.

Повязка является комфортной для пациента, позволяет коже дышать и обладает амортизирующим и защитным действием на рану.

#### Показания

Повязка MELOLIN предназначена для использования на порезах, ссадинах, легких ожогах и послеоперационных разрезах.

#### Инструкция по применению

1. Вымойте руки до и после обработки раны.
2. Осторожно очистите и высушите рану и окружающую кожу.
3. Извлеките повязку из упаковки.
4. Наложите повязку MELOLIN на рану. Повязка накладывается на рану гладкой глянцевой пленочной поверхностью.
5. Зафиксируйте MELOLIN на месте при помощи любой вторичной повязки
6. Меняйте повязку ежедневно или чаще в зависимости от состояния раны.

#### Примечание.

Создавайте давление на кровоточащие раны.

#### Меры предосторожности при использовании.

Немедленно обращайтесь к врачу в случае любых серьезных ран и ожогов, а также при возникновении покраснения или дискомфорта.

---


#### Доступность продукта

##### Доступные размеры повязок MELOLIN:

5x5 см  
10x10 см  
20x10 см

---

#### Производитель

 Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, England.


° Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew

Дата выдачи 03/2015

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

#### УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РОССИИ:

ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д.1, 9 этаж, пом. 1, ком.1  
Тел: +7 (495) 755-55-03

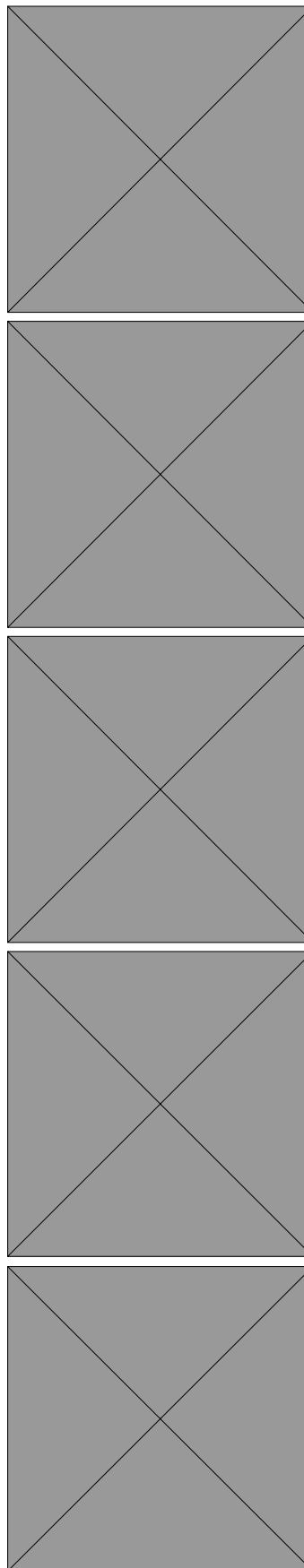

**CE**  
0086