



**Smith+Nephew**

**OPSITE<sup>◇</sup>**

**FLEXIGRID<sup>◇</sup>**

Средства

перевязочные:

Повязка пленочная

## Описание

OPSITE FLEXIGRID представляет собой прозрачную пленочную повязку, состоящую из полиуретановой пленки с акриловым клеевым слоем. Пленка нанесена на гибкую сетчатую подложку для удобства и простоты наложения на рану.

## Принцип действия

При наложении на раны пленка OPSITE создает в них управляемую влажную среду, удерживая экссудат. Пленка является паропроницаемой, что позволяет избыточному экссудату испаряться и предотвращать мацерацию кожи. OPSITE FLEXIGRID является водонепроницаемой и помогает предотвратить бактериальное загрязнение раны. Пленка очень растяжимая, хорошо прилегает и легко накладывается на неудобные анатомические области. Сетчатую подложку можно использовать для определения площади раны при контроле процесса заживления.

## Показания к применению

OPSITE FLEXIGRID показана к применению в следующих случаях:

- Лечение поверхностных ран (например, небольшие поверхностные ожоги, ссадины, натертости, раны, язвы на конечностях в заключительной стадии заживления).
- Защита кожи от трения и внешнего загрязнения. Для профилактики развития пролежней.
- Для фиксации первичных повязок таких как INTRASITE<sup>®</sup> Gel, ALLEVYN Non-Adhesive.
- Для фиксации катетеров.
- Для защиты кожи вокруг стом и под емкостями для сбора жидкостей, крепящимися к конечностям.
- Для перевязки послеоперационных ран, кожных лоскутов и донорских участков после пересадки.

## Предосторожности при применении

Если в рану попадает инфекция, инфекцию следует лечить согласно местному клиническому протоколу. В обращении с волдырями следует проявлять

особую осторожность при удалении повязки, так как верхний слой кожи у волдырей очень нестойкий. Этот слой кожи может оторваться, если срок пребывания повязки на ране небольшой. Необходимо проявлять осторожность, чтобы избежать повреждения кожи при повторных применениях перевязочного материала у пациентов с тонкой или нежной кожей. Есть сообщения о нескольких случаях раздражения и/или мацерации кожи вокруг раны. Следует отметить, что неправильное использование повязки или слишком частые перевязки, особенно у пациентов с ранимой кожей, могут привести к отрыву участка кожи.

Во время нормального процесса заживления из раны удаляются некротические ткани, в результате чего рана кажется больше после первых нескольких перевязок. Если рана продолжает увеличиваться после первых нескольких перевязок, прекратите применение повязки и обратитесь к медицинскому работнику.

При появлении каких-либо признаков раздражения (покраснения, воспаления), мацерации (чрезмерной гидратации кожи), гипергрануляции (разрастанию избыточной ткани) или повышенности чувствительности (аллергические реакции), прекратите использование повязки и обратитесь к медицинскому работнику.

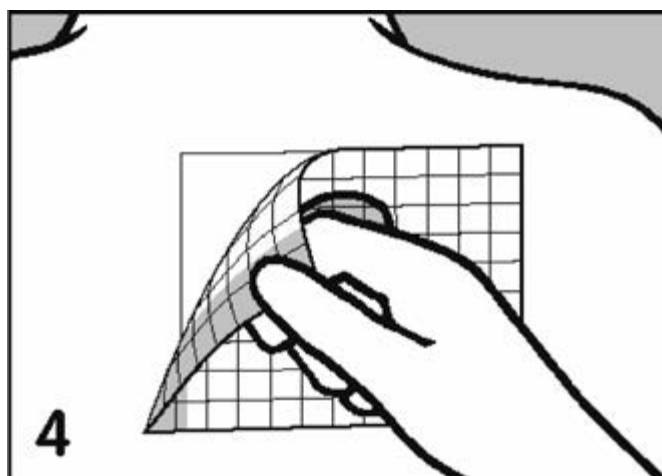
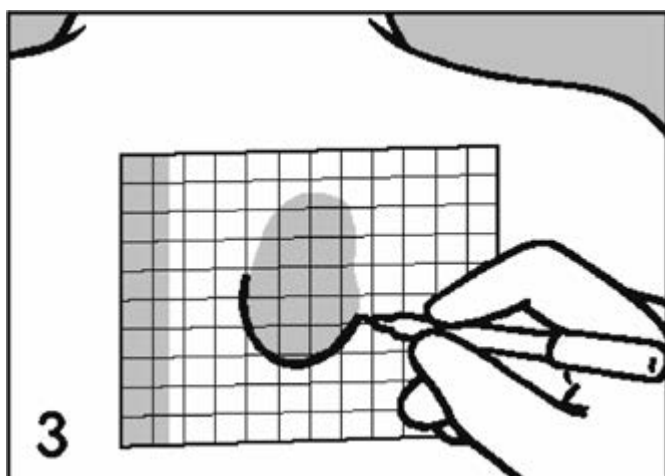
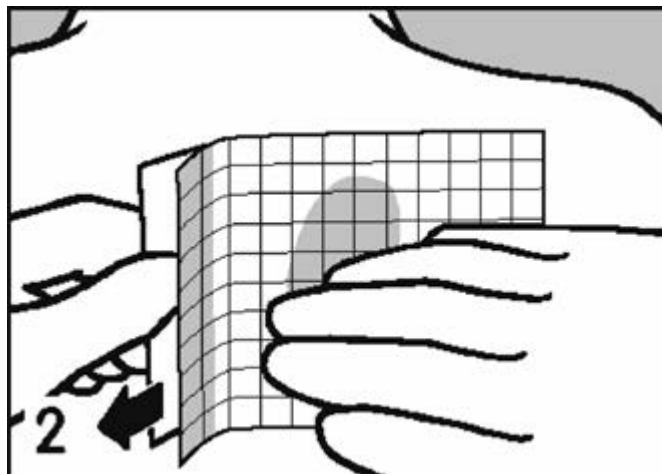
## Инструкции к применению



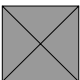

1. Вымойте и высушите область наложения повязки.
2. Снимите бумажную подложку.
3. Наложите повязку, снимите боковой ярлычок и разгладьте повязку.
4. При необходимости обведите контуры раны на зеленой сетчатой подложке, прежде чем снять ее.
5. Удалите подложку.
6. Чтобы удалить повязку, приподнимите один ее угол и осторожно натяните повязку параллельно коже.




Повязку можно оставлять на ране до 14 дней. Использованные повязки утилизировать с соблюдением мер предосторожности.

## Форма выпуска продукции

Код	Размер	Количество в упаковке
4628	6 см x 7 см / 2 <sup>3/8</sup> дюйм x 2 <sup>3/4</sup> дюйм	100
66004633	10 см x 8 см / 4 дюйм x 3 <sup>1/8</sup> дюйм	100
4629	10 см x 12 см / 4 дюйм x 4 <sup>3/4</sup> дюйм	10
4630	10 см x 12 см / 4 дюйм x 4 <sup>3/4</sup> дюйм	50
4631	15 см x 20 см / 6 дюйм x 8 дюйм	10
4632	12 см x 25 см / 4 <sup>3/4</sup> дюйм x 10 дюйм	20



	Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена!
	Стерилизовано этиленоксидом
	Не использовать повторно
	Перед применением прочитайте инструкцию

	Хранить в сухом месте (<25°C/77°F)
	Осторожно!
	Беречь от солнечного света


 Smith & Nephew Medical Limited,  
 101 Hesse Road, Hull HU3 2BN England.  
 ° Торговые марки Smith & Nephew  
 © Smith & Nephew  
 Дата выпуска 07/2017  
[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

  
 0086

**УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РОССИИ:**

ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д.1, 9 этаж, пом. 1, ком.1 Тел:  
 +7 (495) 755-55-03

<b>UK</b>	Smith & Nephew, Croxley Park, Building 5, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire WD18 8YE	Tel: 08000 157 573.
<b>AUSTRALIA</b>	Smith & Nephew Pty Ltd., 85 Waterloo Road, North Ryde NSW 2113.	Tel +61 2 9857 3999.
<b>AUSTRIA</b>	Smith & Nephew GmbH, Concorde Business Park C3, A-2320 Schwechat.	Tel: +43 (0)1 707 91 02.
<b>BELGIUM</b>	Smith & Nephew N.V.-S.A., Hector Henneaulaan 366 - 1930 Zaventem.	Tel: +32 2 702 29 11.
<b>CANADA</b>	Smith & Nephew Inc., 2280 Argentia Road, Mississauga, ON L5N 6H8.	Tel: 1 800 463 7439.
<b>CHINA</b>	Smith & Nephew Ltd, 12F Headquarters Building, 168 Xizang Road (M), Huangpu District, Shanghai 200001.	Tel: +86 21 2330 3000.
<b>DENMARK</b>	Smith & Nephew A/S, Slotsmarken 14, 2970 Hørsholm,	Tel: +45 45 80 61 00.
<b>EASTERN EUROPE</b>	Smith & Nephew GmbH, Concorde Business Park C3, A-2320 Schwechat.	Tel: +43 (0)1 707 91 02.
<b>FRANCE</b>	Smith & Nephew SAS, 40/52 boulevard du Parc - F-92200 Neuilly Sur Seine,	Tél: + 33 (0) 800 111 220.
<b>FINLAND</b>	Smith & Nephew Oy, Äyritie 12 C, 01510 Vantaa.	+358 207 866 300.
<b>GERMANY</b>	Smith & Nephew GmbH, Friesenweg 4/ Haus 21, 22763 Hamburg,	Tel: 040 879744-0.
<b>GREECE</b>	Costas A. Papaellinas (Hellas) SA, 26th km, Paeonias - Markopoulou Ave, PO Box 182, 19400 Koropi.	Tel: 662 6201-7.
<b>HONG KONG</b>	Smith & Nephew Ltd., Unit 813-818, 8/F, Delta House, 3 On Yiu Street, Shatin, N.T.	Tel: (852) 2648 7700.
<b>INDIA</b>	Smith and Nephew HealthCare Pvt. Ltd. B-501-509, Dynasty Business Park, Andheri-Kurla Road, Andheri (E), Mumbai-400059.	Tel: 022 4005 5090.
<b>IRELAND</b>	Smith & Nephew Limited, Carraig Court, George's Avenue, Blackrock, Co. Dublin,	Tel: 01-217 0444.
<b>ITALY</b>	Smith & Nephew S.r.l. - via De Capitani 2A, 20864 Agrate Brianza (MB).	Tel: +39 039 60941.
<b>JAPAN</b>	Smith & Nephew KK, 2-4-1 Shiba-Koen, Minato-ku, Tokyo 105-0011 Japan	Tel: 03-5403-8930
<b>KOREA</b>	Smith & Nephew Ltd, 13F, ASEM Tower 517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea (135-798).	Tel: 2 6001 7575.
<b>MALAYSIA</b>	Smith & Nephew Healthcare Sdn. Bhd. Suite 11.01B & 11.02, Level 11, Menara AmFIRST, No 1 Jalan 19/3, 46300 Petaling Jaya, Selangor.	Tel: +603-7958 7103.
<b>MALTA</b>	Cherubino Ltd, Delf Building, Sliema Road, Gzira.	Tel: 21 343270.
<b>MEXICO</b>	Smith & Nephew, SA de CV, Patricio Sanz No. 442, Colonia del Valle, C.P. 03100, México D.F.,	Tel. 53 40 22 60.
<b>MIDDLE EAST</b>	Smith & Nephew FZE, 4th Floor National Bank of Abu Dhabi Building, Al Jazari Building 47, Dubai Healthcare City - District 8, PO Box 9715, Dubai, U.A.E.	Tel: 971 44299111.
<b>NETHERLANDS</b>	Smith & Nephew B.V., PO Box 525, 2130 AM Hoofddorp, Kruisweg 637, 2132 NB Hoofddorp,	Tel: (+31) (0) 20 6543999.
<b>NEW ZEALAND</b>	Smith & Nephew Limited, Unit A, 36 Hillside Road, Wairau Valley, Auckland 0627	Tel: +64 (0) 9 820 2840.
<b>NORWAY</b>	Smith & Nephew A/S, PO Box 224, Nye Vakas vei 64, 1379 Nesbru,	Tel: +47 66842020.
<b>PAKISTAN</b>	BSN Medical (PVT) Ltd, A/69 SITE, Manghopir Road, PO Box 3659, Karachi 75700.	Tel: + 92 21 32561176-77.
<b>POLAND</b>	Smith & Nephew sp. z o.o. Ul. Osmańska 12 02-823 Warszawa	Tel: +48 22 360 41 20.
<b>PORTUGAL</b>	Smith & Nephew Lda., Estrada Nacional nº 10, Km 131, Parque Tejo - Bloco C, 2625-445 Forte da Casa.	Tel: +351 214 460 650.
<b>SINGAPORE</b>	Smith & Nephew Pte Ltd., 1A International Business Park, #09-03 Tolaram 609933.	Tel: (+65) 6270 0552.
<b>SOUTH AFRICA</b>	Smith & Nephew (Pty) Limited, 30 The Boulevard, West End Office Park, Westville, 3629.	Tel: 031 2428111.
<b>SPAIN</b>	Smith & Nephew SAU, Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona.	Tel: 93 373 73 01.
<b>SWEDEN</b>	Smith & Nephew AB, Box 143, Kråketorpsgratan 20, 43122 Mölndal.	Tel: 031-746 58 00.
<b>SWITZERLAND</b>	Smith & Nephew Schweiz AG Advanced Wound Management, Oberneuhofstrasse 10d, 6340 Baar	Tel. +41 41 766 22 44.
<b>TAIWAN (R.O.C.)</b>	Smith & Nephew (Overseas) Ltd. Taiwan Branch, 9F-2, No. 50, Sec.1, Xincheng South Road Taipei City.	Tel: 886 2 3322 5020.
<b>THAILAND</b>	Smith & Nephew Ltd. 16th Floor Building A, The 9th Towers Grand Rama 9, 33/4 Rama 9 Road, Huaykwang Sub-District, Huaykwang District, Bangkok 10310.	Tel: 66(0)2-116-5581.
<b>TURKEY</b>	Smith ve Nephew Medikal Cihazlar Tic. LTD. ti. Bahçeköy Mah. Orkide Sokak No:8/E 84473 Sarıyer/ ISTANBUL	Tel: +90 212 226 22 55.
<b>UNITED STATES</b>	Smith & Nephew, Inc. 5600 Clearfork Main Street, Suite 600, Fort Worth, TX 76109.	Customer Care Center: 1-817-900-4000.
<b>VENEZUELA</b>	Ace Sales Corp, 8085 NW 68th Street, Miami, Florida 33166.	Tel: 305.835.0310.