



# Smith+Nephew

## OPSITE Post-Op

Повязка абсорбирующая

Влагостойкая и

бактерионепроницаемая

повязка с ячеистой

гигроскопической прокладкой



Одноразовое использование. Стерилизовано этиленоксидом. Повторная стерилизация запрещена. Хранить в сухом месте (<25°C/77°F). Беречь от попадания солнечных лучей.

### Описание


OPSITE Post-Op Visible представляет собой влагостойкую и бактерионепроницаемую повязку с ячеистой гигроскопической прокладкой.

### Механизм действия


Повязка OPSITE Post-Op Visible имеет трехслойную структуру, которая сочетает взаимодействующий с раной слой с низкой адгезией, водо- и бактерионепроницаемую прокладку из губки и влагостойкую пленку с высокой паропроницаемостью. Пленка не пропускает жидкости и бактерии и, пока повязка находится в неповрежденном виде, защищает раневую область от внешних загрязнений. Ячеистая структура водо- и бактерионепроницаемой прокладки из губки обеспечивает постоянную визуализацию раневой области и окружающей кожи без смены повязки. Более того, она может легко накладываться с использованием асептической техники и уменьшать болевые ощущения при снятии благодаря особым образом распределенному клеящему веществу.

### Инструкции по использованию


Очистите и тщательно высушите зону нанесения в соответствии со стандартными процедурами.

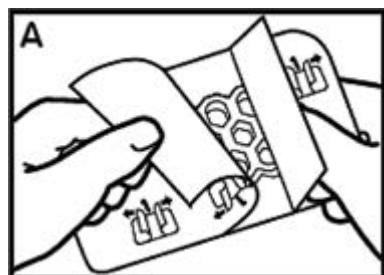

А. Выньте повязку из внешней упаковки. Частично снимите белую/оранжевую бумажную подложку, отмеченную цифрой 1.

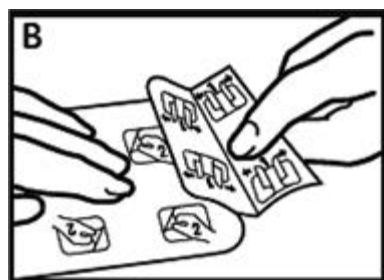

В. Удерживая за неприлипающие концы повязки, аккуратно разместите повязку над желаемой областью. Полностью снимите бумажную подложку.

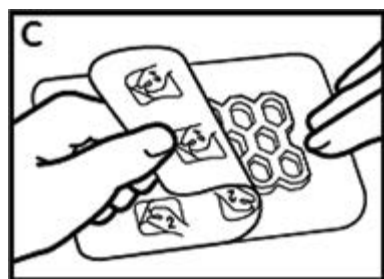

С. Разгладьте повязку на желаемой области, применив небольшое давление, особенно по краям, и убедившись, что прокладка из губки не сжата. Используя небольшой выступ, начните аккуратно снимать верхний слой, отмеченный цифрой 2. Расправьте и выровняйте повязку.

### Снятие

Для снятия повязки аккуратно удерживайте повязку на месте, одновременно захватывая один угол повязки

и приподнимая его, а затем удаляя пленку параллельно коже. Остановитесь, а затем повторите процесс.

### Показания

Для закрытия ран, таких как послеоперационные раны, глубокие порезы, ссадины, царапины и небольшие ожоги, при которых уровень экссудата является низким/средним.

### Меры предосторожности

Используйте только на сухой коже, подготовленной в соответствии со стандартными процедурами. Не используйте повязки поверх друг друга и не перекрывайте их. Периодически осматривайте повязку и раневую область, чтобы подтвердить, что повязка надежно закреплена, особенно после принятия душа или если повязка намокает. Если повязка отклеилась, используйте новую повязку. Как и в случае со всеми клейкими продуктами, используйте и снимайте очень осторожно с чувствительной или слабой кожи. Давление, применяемое к повязке в результате непосредственной массы тела, может привести к кратковременному травмированию или следам вдавливания на коже в виде рисунка ячеистой прокладки из губки. При снятии повязки небольшой рельефный отпечаток ячеистой прокладки из губки может быть заметен на коже. Такой эффект является нормальным и должен пройти через несколько часов. OPSITE Post-Op Visible является продуктом одноразового использования. При использовании несколькими пациентами может возникнуть перекрестное загрязнение или заражение. Открытие упаковки повязки нарушает систему защиты стерильности, поэтому любая неиспользуемая повязка не должна храниться для использования в более позднее время.

### Противопоказания

Не используйте повязку под компрессионными повязками или одеждой.

### Доступность продукции

Код	Размер	Доступность
66800136	10 см x 8 см / 4 дюйма x 3 1/8 дюйма	Коробка из 20 штук
66800137	15 см x 10 см / 6 дюймов x 4 дюйма	Коробка из 20 штук
66800138	20 см x 10 см / 8 дюймов x 4 дюйма	Коробка из 20 штук
66800139	25 см x 10 см / 10 дюймов x 4 дюйма	Коробка из 20 штук
66800140	30 см x 10 см / 11 3/4 дюймов x 4 дюйма	Коробка из 20 штук
66800141	35 см x 10 см / 13 3/4 дюймов x 4 дюйма	Коробка из 20 штук

«Смит энд Нэфью Медикал Лтд.»  
 NU3 2BN Англия, Халл, Хессл Роуд, 101  
 Торговая марка «Смит энд Нэфью»  
 «Смит энд Нэфью». Дата выпуска: 11/2012  
 Сделано в Китае.



0086

### УПолномоченной Представитель Производителя в России:

ООО «Смит энд Нэфью», 105120, Россия, г. Москва,  
 2-й Сыромятнинский пер., д.1, 9 этаж, пом. 1, ком.1  
 Тел: +7 (495) 755-55-03

<b>АВСТРАЛИЯ</b>	Smith & Nephew Pty Ltd 85 Waterloo Road North Ryde NSW 2113 PO Box 393 North Ryde BC NSW 1670	Tel: +61 2 9857 3999
<b>АВСТРИЯ</b>	Smith & Nephew GmbH Concorde Business Park C3 Österreich A-2330 Schwechat	Tel: +43 1 70 79102
<b>БЕЛЬГИЯ</b>	Smith & Nephew S.A.-N.V. Hector Henneaulaan 366 1930 Zaventem	Tel: +32 2 702 2911
<b>КАНАДА</b>	Smith & Nephew Inc. 2280 Argentia Road Mississauga, ON L5N 6H8	Tel: 1 800 463 7439
<b>КИТАЙ</b>	Smith & Nephew Ltd. 12F Headquarters Building, 168 Xizang Road (M), Huangpu District Shanghai 200001	Tel: +86 21 2330 3000
<b>ДАНИЯ</b>	Smith & Nephew A/S Slotsmarken 142970 Høersholm	Tel: +45 4580 6100
<b>НИДЕРЛАНДЫ</b>	Smith & Nephew B.V. PO Box 5252 130 AM Hoofddorp Kruisweg 637, 2132 NB Hoofddorp	Tel: (+31) (0) 20 6543999
<b>НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ</b>	Smith & Nephew Limited PO Box 442 Shortland Street Auckland 1140	Tel: +64 9 828 4059
<b>НОРВЕГИЯ</b>	Smith & Nephew A/S PO Box 224 Nye Våkås vei 64 1379 Nesbru	Tel: 66842020
<b>ПАКИСТАН</b>	BSN Medical (PVT) Ltd A/69 SITE Manghopir Road PO Box 3659 Karachi 75700, Pakistan	Tel: +92 21 32561176-77
<b>ПОЛЬША</b>	Smith & Nephew Sp. Z o.o Ul. Marynarska 1502-674 Warszawa	Tel: +48 22 360 41 20
<b>ПОРТУГАЛИЯ</b>	Smith & Nephew, Lda. Estrada Nacional n° 10, Km 131 Parque Tejo - Bloco C 2625-445 Forte da Casa Portugal	Tel: +351 21 4 46 06 50
<b>ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА</b>	Smith & Nephew GmbH Concorde Business Park C3 A-2320 Schwechat	Tel: +43 (0)1 707 91 02.
<b>ФИНЛЯНДИЯ</b>	Smith & Nephew Oy Äyritie 12 C 01510 Vantaa	Tel: +358 207 866 300
<b>ФРАНЦИЯ</b>	Smith & Nephew SAS 25 bd Alexandre Oyon 72019 Le Mans Cedex 2	Tel: +33 02 43 83 23 23
<b>ГЕРМАНИЯ</b>	Smith & Nephew GmbH Friesenweg 4/Haus 21 22763 Hamburg	Tel: +49 040 879744 0
<b>ГРЕЦИЯ</b>	Costas A. Papaellinas (Hellas) SA 26th km, Paeanias - Markopoulou Ave PO Box 18219400 Koropi	Tel: 662 6201-7
<b>ГОНКОНГ</b>	Smith & Nephew Ltd Unit 813-816, 8/F Delta House 3 On Yiu Street Shatin N.T.	Tel: (852) 2648 7700
<b>СИНГАПУР</b>	Smith & Nephew Pte Ltd. 1A International Business Park #09-03 Tolaram 609933	Tel: (+65) 6270 0552
<b>ЮЖНАЯ АФРИКА</b>	Smith & Nephew (Pty) Ltd. 30 The Boulevard West End Office Park Westville, 3629	Tel: 031 2428111
<b>ИСПАНИЯ</b>	Smith & Nephew SAU Fructuós Gelabert, 2-4 08970 Sant Joan Despí Barcelona	Tel: 93 373 73 01
<b>ШВЕЦИЯ</b>	Smith & Nephew AB PO Box 143 Kråketorpsgatan 20 43122 Mölndal	Tel: 031-746 58 00
<b>ШВЕЙЦАРИЯ</b>	Smith & Nephew AG Glutz Blotzheim-Str. 1 CH-4502 Solothurn	Tel: 32 624-5660
<b>ИНДИЯ</b>	Smith & Nephew Health Care Pvt. Ltd. B-501-509, Dynasty Business Park Andheri-Kurla Road, Andheri East, Mumbai – 400059	Tel: 022 4005 5090
<b>ИРЛАНДИЯ</b>	Smith & Nephew Limited 4045 Kingswood Road Citywest Co. Dublin	Tel: 1 890 76 36 36
<b>ИТАЛИЯ</b>	Smith & Nephew S.r.l. Via De Capitani 2A 20864 Agrate Brianza	Tel: 800 393 060
<b>ЯПОНИЯ</b>	Smith & Nephew Wound Management KK 2-4-1 Shiba Park, Minato-ku Tokyo 105-0011, Japan	Tel: 03-5403-8930
<b>КОРЕЯ</b>	Smith & Nephew Ltd 13F, ASEM Tower 517 Yeongdong-daero Gangnam-gu, Seoul, Korea (135-798)	Tel: 2 6001 7575
<b>ТАЙВАНЬ (КИТАЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА)</b>	Smith & Nephew (Overseas) Ltd Taiwan Branch 9F-2, No. 50, Sec 1 Xinsheng South Road Taipei City	Tel: 886 2 3322 5020
<b>ТАЙЛАН</b>	Smith & Nephew Ltd 16th Floor Building A The 9th Towers Grand Rama 9 33/4 Rama 9 Road Huaykwang Sub-District Huaykwang District, Bangkok 10310	Tel: 66(0)2-116-5581
<b>ТУРЦИЯ</b>	Smith ve Nephew Medikal Cihazlar Tic. LTD. Şti. Bahçeköy Mah. Orkide Sokak No:8/E 84473 Sarıyer Istanbul	Tel: +90 212 226 22 55
<b>МАЛАЙЗИЯ</b>	Smith & Nephew Healthcare Sdn. Bhd Suite 11.01B & 11.02, Level 11 Menara AmFIRST, No 1 Jalan 19/3 46300 Petaling Jaya Selangor	Tel: +603-7958 7103
<b>МАЛЬТА</b>	Cherubino Ltd Delf Building, Sliema Road Gzira	Tel: 21 343270
<b>МЕКСИКА</b>	Smith & Nephew, SA de CV Patricio Sanz No. 442 Colonia del Valle, C.P. 03100 Mexico D.F.	Tel: 53 40 22 60
<b>БЛИЖНИЙ ВОСТОК</b>	Smith & Nephew FZE 4th Floor National Bank of Abu Dhabi Building Al Jazari Building 47 Dubai Healthcare City -District 8 PO Box 9715 Dubai, U.A.E.	Tel: 971 4 4299111
<b>СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО</b>	Smith & Nephew Healthcare Ltd. Healthcare House 101 Hessle Road Hull, HU3 2BN	Tel: +44 01482 222 200
<b>СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ</b>	Smith & Nephew, Inc. Advanced Wound Management 3909 Hulen Street Fort Worth, TX 76107	Customer Care Center: 1 800 876 1261
<b>ВЕНЕСУЭЛА</b>	Ace Sales Corp 8085 NW 68th Street Miami, Florida 33166	Tel: 305 835 0310