



Smith+Nephew

Средства перевязочные
Повязка абсорбирующая

PRIMAPORE[◇]

адгезивная

СТЕРИЛЬНОЕ Для одноразового использования.

Стерилизовано окисью этилена.

Не используйте содержимое, если упаковка открыта или повреждена.

Хранить в сухом месте (<25 °C).

Описание

Адгезивные абсорбирующие повязки PRIMAPORE состоят из абсорбирующей прокладки с низкой адгезией и мягкой клейкой каймой. Повязка остается на месте даже в неудобных для фиксации повязки областях.

Показания

Адгезивные абсорбирующие повязки Primapore предназначены для перевязки послеоперационных ран, а также прочих ран инвазивного происхождения.

Инструкция по применению

1. Вымойте руки до и после обработки раны.
2. Осторожно очистите и высушите рану и окружающую кожу.
3. Извлеките повязку из упаковки.
4. Удалите верхнюю часть подложки.
5. Удалите вторую часть подложки и расправьте повязку, убедившись, что повязка полностью покрывает рану.
6. Меняйте повязку по необходимости (например, если она намочила или загрязнена).

Удаление

7. Снимайте осторожно, в особенности при слабой коже или при использовании у пожилых пациентов. Придерживайте кожу свободной рукой, осторожно снимая повязку по росту волос.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Создавайте давление на кровоточащие раны.

Меры предосторожности при использовании

Немедленно обращайтесь к врачу в случае любых серьезных ран или ожогов, а также при возникновении покраснения или дискомфорта. Как и другие клеящиеся изделия, Primapore Adhesive следует наклеивать и снимать осторожно. Частая смена повязки, в особенности у пациентов со слабой кожей или дерматологическими заболеваниями, может привести к покраснению или повреждению кожи.

Доступность продукта

Адгезивные абсорбирующие повязки:

7,2x5 см

8,3x6 см

10x8 см


15x8 см

10x20 см

10x25 см

10x30 см

10x35 см

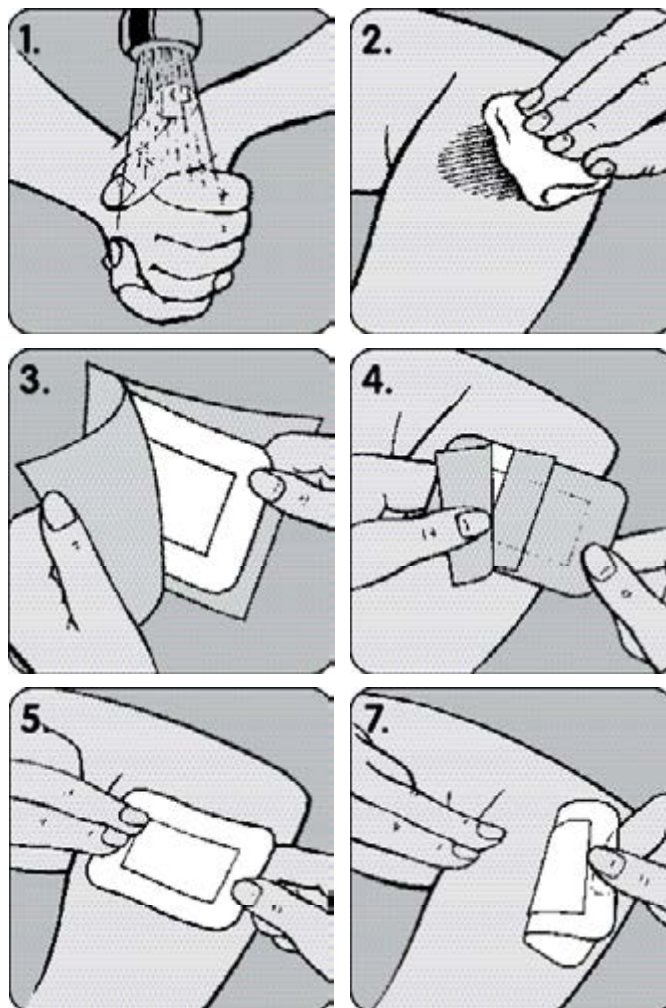

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101
Hessle Road, Hull HU3 2BN, England.

©Smith & Nephew

Дата выдачи 03/2015

www.smith-nephew.com



0086

УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РОССИИ:

ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва,
2-й Сыромятнинский пер., д.1, 9 этаж, пом. 1, ком.1
Тел: +7 (495) 755-55-03