


 **ALLEVYN[®]**
ADHESIVE
Адгезивная губчатая
полиуретановая
абсорбирующая повязка

СТЕРИЛЬНО  Радиационный метод стерилизации. Предназначено только для одноразового использования. Не использовать повязку из открытой или поврежденной упаковки. Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°С/77° F. Избегать воздействия света.

Описание
Повязка ALLEVYN Adhesive имеет современную трехслойную конструкцию, состоящую из абсорбирующего губчатого слоя, расположенным между не прилипающим перфорированным внутренним слоем, непосредственно контактирующим с раной, и наружным пленочным полупроницаемым покрытием, защищающим рану от проникновения микроорганизмов и влаги.

Механизм действия

Современная трехслойная конструкция ALLEVYN Adhesive помогает поддерживать оптимальную влажность в области раны, что способствует созданию оптимальной раневой среды для наилучшего заживления ран и уменьшению риска мацерации. Наружное пленочное покрытие помогает защитить раны от проникновения микроорганизмов и влаги.

Для фиксации повязки не требуется вторичная повязка, ее легко накладывать и удалять.

Показания к применению
Заживление ран вторичным натяжением, лечение хронических гранулирующих ран, хронических и острых экссудирующих ран, как глубоких, так и поверхностных, таких как пролежни, трофические венозные

язвы, диабетические язвы стоп, малигнизированные язвы, хирургические раны, ожоги первой и второй степени, донорские участки при пересадке кожи и грибковые язвы. В некротических и гнойно-фибринозных ранах может использоваться совместно с гелем INTRASITE™.

ALLEVYN Adhesive может также использоваться для инфицированных ран. При использовании в инфицированных ранах необходимо определение возбудителя инфекции и лечение согласно принятому клиническому протоколу.

Меры предосторожности
• Не применяйте повязки ALLEVYN Adhesive вместе с такими окислителями, как растворы гипохлорита (например, ЭУСОЛ) или перекиси водорода,

поскольку они могут повредить абсорбирующий полиуретановый компонент повязки. Как и у всех самоклеящихся повязок, при использовании ALLEVYN Adhesive описаны отдельные случаи раздражения и мацерации кожи вокруг раны, а также редкие случаи гиперчувствительности. Если началось покраснение кожи или возникла аллергическая реакция, удалите повязку и обратитесь за консультацией к специалисту.

- Необходимо отметить, что раздражение кожи чаще встречается при неправильном использовании повязки или слишком частой ее смене, особенно у пациентов с чувствительной кожей.
- ALLEVYN Adhesive – это продукт для однократного использования. Применение одной повязки для лечения

ран у нескольких пациентов может вызвать перекрестное заражение или развитие инфекции. Вскрытие упаковки нарушает стерильность повязки, поэтому нельзя откладывать наложение вскрытой повязки на другой день.

Инструкция по применению:

- 1 Очистите рану в соответствии с местным клиническим протоколом.
- 2 Выберите повязку подходящего размера. При необходимости вырежьте повязку подходящей формы ALLEVYN Adhesive. Моделируя повязку, всегда соблюдайте асептические условия.
- 3 Подготовьте и очистите кожу вокруг раны путем удаления избыточного экссудата. Сбрейте волосы вокруг раны, чтобы повязка хорошо прилегалась к раневой поверхности. Для обработки чувствительных участков кожи перед

апликацией ALLEVYN Adhesive используйте салфетки SKIN-PREP™.

- 4 Соблюдая стерильность, начните удалять защитную наклейку с ALLEVYN Adhesive и накладывать повязку клейкой стороной на кожу.
- 5 Удалите оставшуюся защитную наклейку, полностью наложите повязку, осторожно разгладьте её над раной, стараясь не допускать образования складок. Губчатый слой должен закрывать всю поверхность раны.
- 6 Если ALLEVYN Adhesive был вырезан, необходимо защитить открытые губчатые участки подходящим пленчатым покрытием, стараясь не закрыть всю повязку.
- 7 При наложении повязки ALLEVYN Adhesive Sacrum расположите узкий конец повязки на 2 см выше анального

сфинктера, а затем разгладьте повязку над крестцом.

Частота смены повязки
В начальных фазах лечения раны ревизия повязки ALLEVYN Adhesive должна производиться согласно местному клиническому протоколу. Повязку можно оставлять на месте до 7 дней, в зависимости от состояния раны и окружающей кожи или до тех пор, пока видимая граница экссудата не достигнет 0,5 см от края повязки. Если повязку накладывают на крестцовую зону, то этот срок не должен превышать 5 дней, однако, учитывая повышенную вероятность загрязнения и заражения, ревизию повязки следует проводить чаще согласно местному клиническому протоколу. Решение о смене повязки должно зависеть от клинической

оценки с учетом требований местных протоколов.

Удаление повязки

Чтобы удалить повязку ALLEVYN Adhesive необходимо вначале приподнять ее за один из уголков и затем потянуть кнаружи до полного удаления ее из раны. Удаление повязки на крестце рекомендуется начинать с верхнего края по направлению к анусу для минимизации риска распространения инфекции. Шкала на упаковке повязки предназначена исключительно для выбора повязки, следует следить за тем, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Ассортимент

Код	Штук в упаковке
66000043	10
66000059	10
66000044	10
66000077	3
66000045	10
66000074	10
66000046	10
66000451	10
66000070	10

Размер

7.5см x 7.5см / 3" x 3"
10см x 10см / 4" x 4"
12.5см x 12.5см / 5" x 5"
15см x 15см / 6" x 6"
17.5см x 17.5см / 7" x 7"
12.5см x 22.5см / 5" x 9"
22.5см x 22.5см / 9" x 9"
Повязка Sacrum 22см x 22см / 9" x 9"
Повязка Sacrum 17см x 17см / 6 3/4" x 6 3/4"
"- дюймы

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN, Англия
Товарные знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 12/2013
Номера патентов: US 5681575, 5753251, 5770255, 5837275
www.smith-nephew.com

46529_RU_Jul17

