



Smith+Nephew

Средства перевязочные
Повязка абсорбирующая

ALLEVYN[®]

губчатая полиуретановая

Для ран с уровнем экссудата от среднего до высокого.

Описание

Повязка ALLEVYN Tracheostomy объединяет в себе абсорбирующую губчатую прокладку, размещенную между перфорированным неклеящим слоем для контакта с раной и водонепроницаемой внешней пленкой. «Замочная скважина» в повязке позволяет повязке плотно располагаться вокруг трахеостомической трубки или другого дренажа или стомы.

Механизм действия

Повязка Allevyn Tracheostomy обладает очень высокой впитывающей способностью. Это помогает поддерживать в хорошем состоянии кожу в области стомы. Отсутствие адгезивного слоя облегчает наложение повязки, снижает травматичность при смене повязок, а наружная пленка препятствует просачиванию экссудата.

Показания

Абсорбирующая повязка для стом, образованных в результате трахеостомии, или для мест вокруг дренажей.

Инструкция по применению

1. Очистите рану в соответствии со стандартными процедурами.
2. Подготовьте и очистите кожу вокруг трахеостомической трубки, удалив лишнюю влагу.
3. Накладывайте повязку рельефной стороной белого цвета к коже.
4. При необходимости повязку можно обрезать до нужной формы. Может использоваться дополнительная фиксация, например, повязка OPSITE[®] FLEXIGRID[®] или HYPAFIX[®].
5. Повязки ALLEVYN Tracheostomy не должны использоваться повторно.

Частота смены

На ранних этапах ведения раны, повязку Allevyn Tracheostomy следует проверять часто. Повязку можно оставлять не меняя до 7 дней, или до пропитывания ее экссудатом. Пленка OPSITE, образуя наружный водонепроницаемый слой, предотвращает бактериальное загрязнение раны.

Снятие повязки

Для снятия повязки ALLEVYN Tracheostomy удалите фиксирующую повязку или бинт, а затем поднимите повязку с раны.

Меры предосторожности


Не используйте повязки ALLEVYN Tracheostomy с окислителями, такими как растворы гипохлорита (напр., EUSOL) или перекисью водорода, поскольку они могут разрушить абсорбирующий полиуретановый компонент повязки.

Шкала на упаковке служит лишь для того, чтобы помочь в выборе повязки. Необходимо принимать меры, чтобы избежать перекрестного заражения.

Доступность продукта

Код	Размер	Доступность
66007640	9 см x 9 см	10 шт. в коробке
66007674	4 см x 6 см	10 шт. в коробке

Производитель

 Smith & Nephew Medical Limited, 101
Hessle Road, Hull HU3 2BN, England
° Торговые знаки Smith & Nephew
©Smith & Nephew
Дата выдачи 01/2015
www.smith-nephew.com



УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РОССИИ:

ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва,
2-й Сыромятнический пер., д.1, 9 этаж, пом. 1, ком.1
Тел: +7 (495) 755-55-03

